



● 快測のここがポイント ●

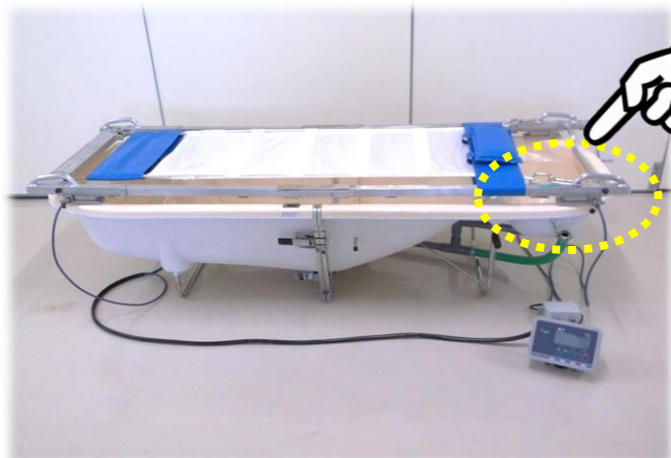

体重計を タンカ枠に内蔵

- 浴槽の下に敷き込むなど、作業に手間がかかりません。
- 浴槽に湯を張っている最中でも体重測定が可能です。

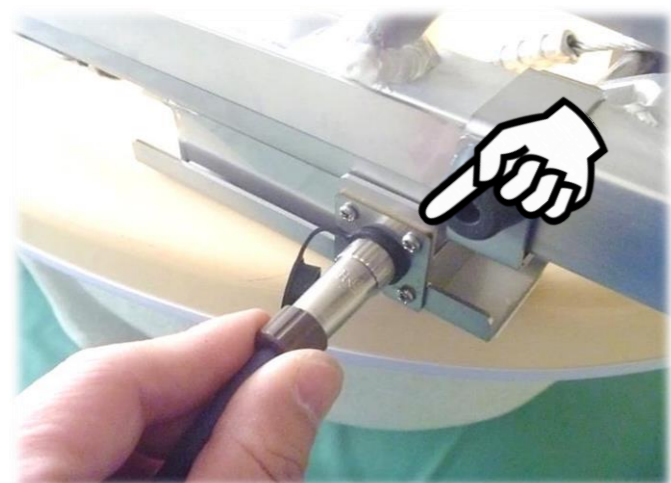

コードは着脱式

- コードは着脱式になっているので、使用していない時はコードを外す事が可能です。
サービス中のコードの煩わしさの解消と、必要な時のみ使用するため、断線の予防につながります。




モニターは充電式


- モニターは充電式のため、ご利用者宅のご自宅の電源をお借りする必要がありません。また、配線が少なく済む為、サービスの邪魔にもなりません。

常に同じ条件で測定可能

- 体重測定は、同じ条件で測定しその推移を見る事が重要です。タンカスケールは浴槽の上に設置されるため、床の状況に左右される事無く、常に同じ条件で測定可能です。

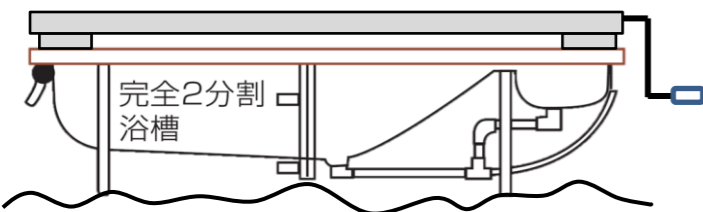

●●● 商品紹介 ●●●

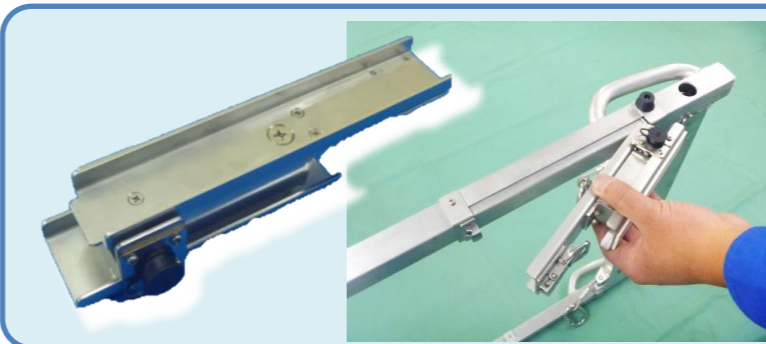

タンカスケールセンサー (合計4個)

タンカスケールの本体です。タンカ枠の白ゴム部分に取り付けて、使用します。



カットゴムアダプター (合計4個)

体重測定をしない時には、カットゴムアダプターを取り付ける事で従来のタンカ枠と同様にご使用いただけます。




モニター

体重を表示します。充電式です。




モニター 充電用ケーブル

モニターを充電する際に使用します。

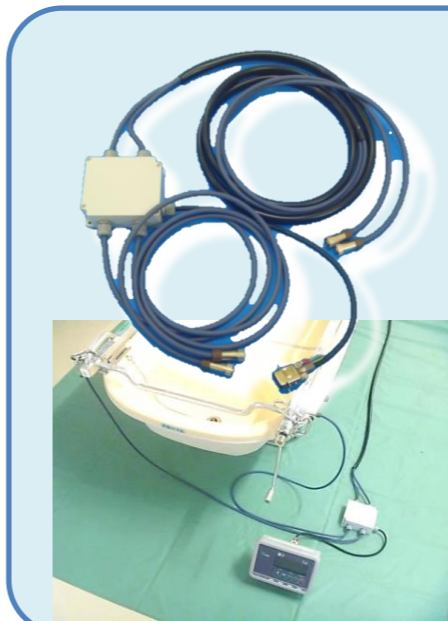

モニターケーブル

タンカスケールとモニターを接続する際に使用します。ケーブルは着脱式になっているため体重測定後、すぐにモニターケーブルを取り外す事も出来ます。足元の配線がすっきりとして作業性を損なう事ありません。

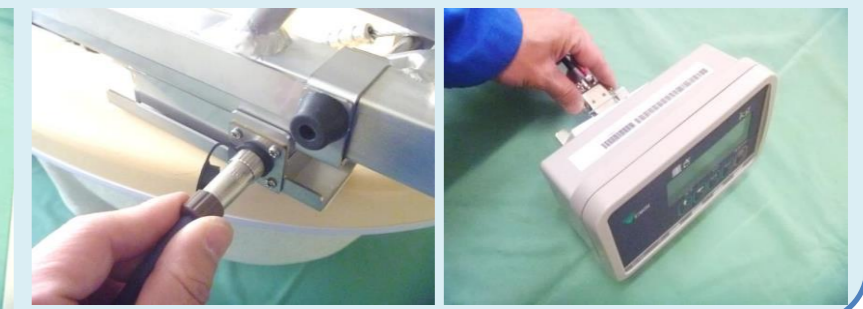

お気軽にお問い合わせください

〒310-0841 茨城県水戸市酒門町1744-2
デベロ ☎029-247-2211 (代) ☎029-247-2214
 (株) ホームページ <http://www.develo-group.co.jp> デベロ

入浴福祉推進部まで

タンカスケールの特徴

- ①タンカ枠組込式
 - タンカ枠に組込むため、設置に際してオペレーションを変更することがありません。
 - 体重を測る対象はタンカ枠に乗るご利用者だけ。湯を張りながらの体重測定も可能です。
 - タンカを浴槽の上に設置するため、床の状況に左右されることなく正確な体重測定が可能です。
- ②タンカスケールはワンタッチでいつでも取り外し可能
- ③ケーブルをまとめてすっきり配線
- ④モニターが充電式のため、ご利用者宅の電源をお借りする必要がありません。

タンカスケール導入の流れ

ご注文確定

貸出用タンカの貸出※

タンカスケール取付用タンカを一旦お預かりいたします※

お預かりしたタンカにタンカスケールを取付けます

タンカスケール納品・取扱説明
貸出タンカの引上げをさせていただきます

納期:ご注文確定から約2か月

※貸出タンカの貸出と、タンカスケール取付用タンカのお預かりは別途送料が発生します。

体重測定について未来ちゃんのここがポイント!!



- ・健康/栄養管理
食事療養の際にはマメな体重管理が必要!!
- ・褥瘡対策
エアーマットの空気調整にもお役立ち!!

- ・お薬の投与が正確に
薬の量も、正確な体重で安心!!
- ・他職種連携の要
全身観察が可能な訪問入浴にプラスアルファ!!主治医を始めとする他事業所が大助か

お気軽にお問い合わせください

デベロ

☎310-0841 茨城県水戸市酒門町1744-2

☎029-247-2211 (代) ☎029-247-2214

ホームページ <http://www.develo-group.co.jp> デベロ

入浴福祉推進部まで

訪問入浴専用体重計 タンカスケール 快測-KAISOKU-



センサーは
タンカ枠に組込み



モニターは
充電式

価格:398,000円(税別) / 取付加工費込

快測にて測定した体重は、あくまで参考値としてご活用ください。

在宅介護の現場で困難だった体重測定を
安全に実現可能にしました

センサーはフレームに
簡単に取付可能



※センサーを取り付けるために事前加工が必要となります。

モニターケーブルでモニターと接続すれば
すぐに体重測定が可能です



デベロ